



Vejledning til

MagniLite luplampe



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen
lysoglup.dk/upload_dir/docs/MagniLite_dansk_vejledning.pdf
eller scan QR-koden til venstre

Se videovejledningen til MagniLite på adressen
youtu.be/101-xMPjBi4
eller scan QR-koden til højre



Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Indholdet i æsken	2
Rundt om MagniLite.....	2
Opladning	3
Tænde og slukke	4
Tilpasse lysstyrken	4
Tilpasse lampens hængselled	4
Tekniske specifikationer	4

Introduktion


Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres MagniLite lomme-luplampe. For at få det fulde udbytte af lampen, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Undgå at se direkte på lampens lyskilder. De er stærke, og blænder nemt.
- Når De ikke benytter Deres MagniLite, bør den opbevares i det medleverede etui (mærket "D" i oversigten på side 2). Dette beskytter linsen mod støv og ridser, og mod at sollys koncentrerer i linsen med brandfare til følge.
- MagniLite er ikke vandtæt, og bør kun bruges inden døre i tørre omgivelser. Undgå at spilde vand og andre væsker på lampen.
- Eventuel rengøring skal ske med en blød, fnugfri klud, eventuelt *let* fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug *ikke* opløsningsmidler eller skurende rengøringsmidler.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Indholdet i æsken

Her følger en oversigt over de ting, der skal være til stede i æsken. På illustrationen er alle delene mærket med et bogstav; i resten af denne vejledning vil vi ind imellem henvise til denne oversigt, når en af delene omtales.

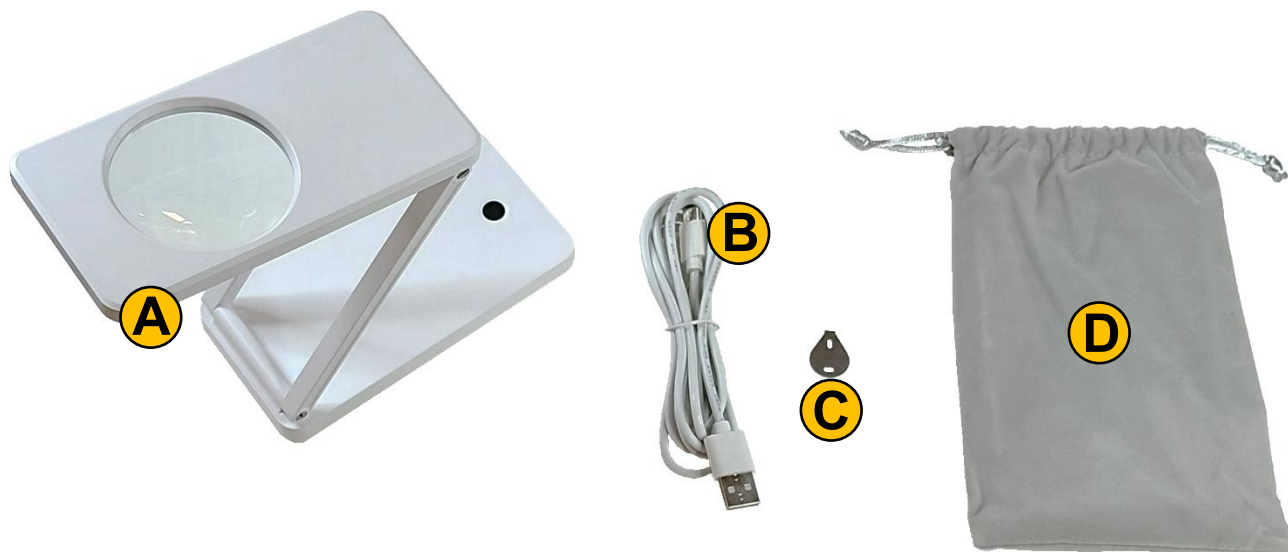

- A. MagniLite lomme-luplampe
- B. Ledning til opladning
- C. Mini-skruetrækker
- D. Opbevarings-etui i blødt stof.

Rundt om MagniLite

I det følgende opregnes de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres MagniLite-luplampe, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

- 1. Linse
- 2. Betjeningsknap
- 3. Stikhul til opladning
- 4. Indikatorlys



Opladning


Deres MagniLite virker ved hjælp af et indbygget, opladeligt batteri. Dette batteri oplades med den medfølgende ledning (mærket "B" i oversigten på side 2), samt en almindelig lysnet-adapter med USB-A-stik. ***En sådan lysnet-adapter medfølger ikke, men skal anskaffes separat.***

Lysnetadapters til opladning af mobiltelefoner og en række andre opladelige apparater kan benyttes.

Den medfølgende ledning har to stik, hvoraf det ene er lidt mindre end det andet:

- Det **mindste** stik sættes i stikhullet langs kanten af MagniLite-lampens fod.
- Det **største** stik sættes i stikhullet på Deres lysnet-adapter.

Lysnetadapteren sættes i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten, hvis denne har en afbryder-tangent.

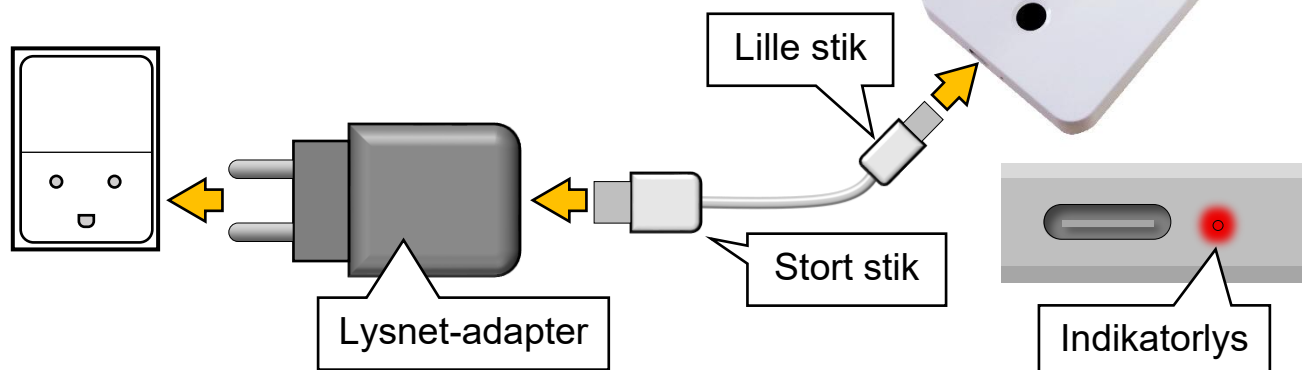

Mens batteriet i MagniLite lades op, lyser det lille indikatorlys ved siden af stikhullet til opladning (nr. 3 i oversigten på forrige side) rødt. Når indikatorlyset slukkes, er batteriet ladet op (dette kan tage op til to en halv time, hvis batteriet var helt tømt for strøm, da opladningen blev påbegyndt), og når det sker, bør man trække stikket ud af MagniLite; lampens batteri har ikke godt af at modtage mere strøm, når det allerede er ladet helt op.

De kan bestille en lysnetadapter der passer til Magnilite-lommeluplampen på adressen <https://lysoglup.dk/shop/106/3376> eller ved at scanne QR-koden ovenfor til højre.



Tænde og slukke

Fold lampen ud, og stil den op, så den omtrent ligner bogstavet Z. Lyset i MagniLite tændes ved at trykke *kortvarigt* på betjeningsknappen på lampens fod (nr. 2 i oversigten på side 2). For at slukke lyset, skal man igen trykke *kortvarigt* på betjeningsknappen.

Tilpasse lysstyrken

Når lampen er tændt, kan lysets styrke tilpasses ved at trykke betjeningsknappen på lampens fod (nr. 2 i oversigten på side 2) ned, og **holde den trykket ned** i nogle sekunder: Dette får lysets styrke til enten at øges eller aftage gradvist. Slip knappen, når lyset har den ønskede styrke.

Hvis lyset øges, hvor De ønskede at dæmpe det, eller omvendt, så slip knappen, og tryk den så ned igen og hold den trykket ned. Hver anden gang man trykker længerevarende på knappen, øges lysstyrken, og de andre gange man gør det, sænkes lysstyrken.

Tilpasse lampens hængselled

Der medleveres en "mini-skruetrækker" (mærket "C" i oversigten på side 2), som bruges til at stramme eller løsne de skruer, der sidder på den ene af lampens to "arme": Derved kan man tilpasse hvor "stramme", hængselleddene mellem lampens arme, hoved og fod skal være.

- Drej skruerne **højre om** (eller "med uret") for at **stramme** leddene, eller
- Drej skruerne **venstre om** (eller "mod uret") for at **løсне** leddene.

Tekniske specifikationer

Linse	1¾× forstørrelse/3 dioptrier, 6 cm i diameter
Vægt med batteri	250 gram
Strømforbrug	3W v. maks. lysstyrke. 8W, hvis batteriet samtidig oplades
Batterikapacitet	1200 milliamperetimer
Ladetid	Op til 2½ time
Driftstid	4 timer v. maks. lysstyrke, når batteriet er fabriksnyt
Farvetemperatur	6000K (svarer til naturligt dagslys)