

# Højtlæsning på MirrorPad Pro

## Starte højtlesning

Tryk **kortvarigt** på knap 1.

Læg teksten under apparatet, så den kan ses på skærmen.

Tryk på knap 3 for at starte højtlesningen.



Man kan også starte højtlesningen ved at trykke på det sorte felt med en taleboble, der ses på skærmen.

## Mens der læses højt

Tryk på knap 3 for at holde pause. Når man vil have højtlesningen til at fortsætte, trykker man på knap 3 igen.

## Få den til at læse *det hele*

Apparatet læser i udgangspunktet enkelte dele af teksten højt, og "forventer" så, at man vælger hvilken del, man vil have læst højt. Dette er godt til, når man læser en avisside, og vil vælge de artikler, der skal læses højt.

Men for at få den til at læse *al* teksten højt, skal man trykke på knap 2: Så kommer der sådan en "bjælke" frem i bunden af skærmen:



Hvis man trykker med fingeren på det sorte felt **yderst til højre** på denne bjælke, så skifter man mellem at få læst *en del af* teksten højt ad gangen, og at få læst *det hele* højt.


- Når stemmen siger "*Segmentering slået fra*", bliver *al* teksten læst højt.
- Når stemmen siger "*Segmentering slået til*", læses der kun en del af teksten højt, hvorefter apparatet venter på, at man vælger den næste del, der skal læses højt.



## Få plads til et helt A4-ark til højtlesning

For at få et helt A4-ark til at passe indenfor billedet på skærmen, så MirrorPad kan læse det højt, skal man gøre følgende:

Tryk knap **2** ned, og *hold den nede* i ca. 3 sekunder. Så får man det her skærmbillede frem:

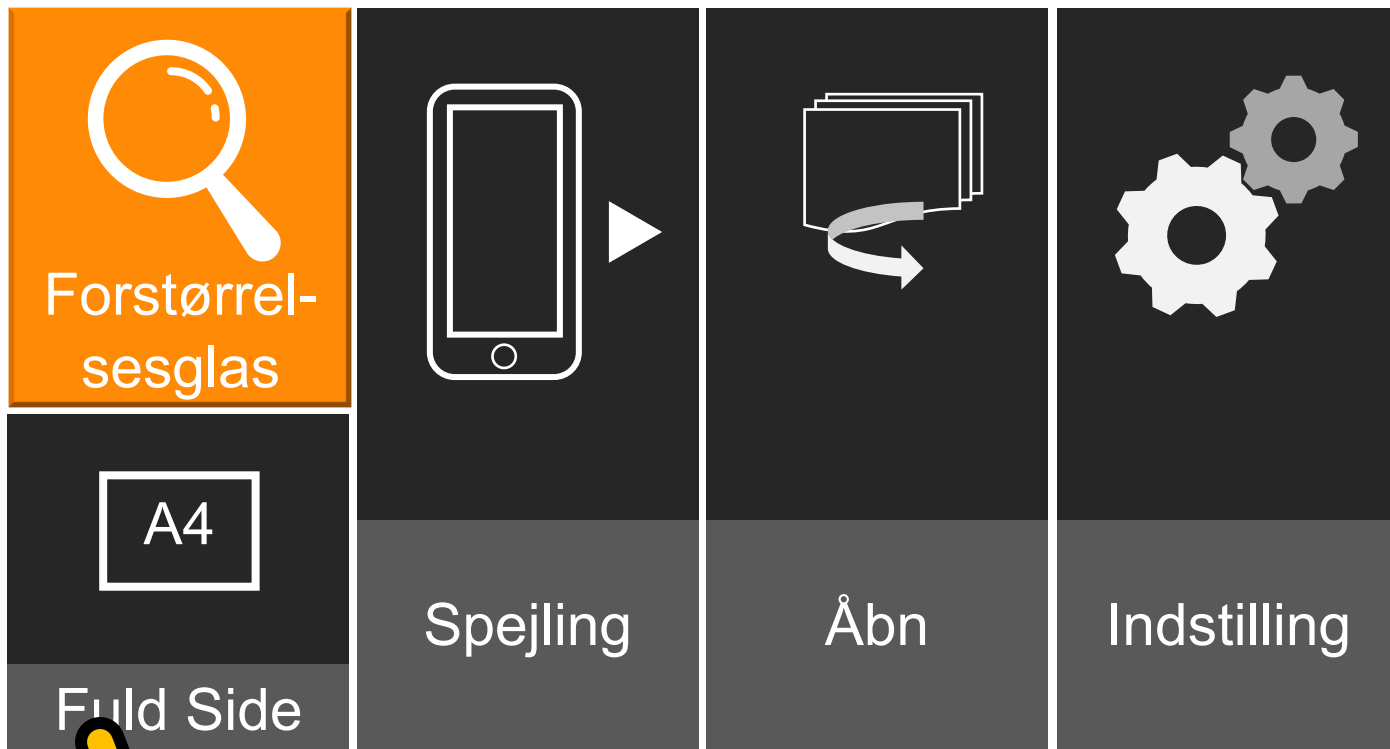

Tryk med en finger direkte på det felt på skærmen, hvor der står "A4" og "Fuld side". Nu viser skærmen et lidt "formindsket" billede af, hvad der ligger under apparatet, og det giver plads til, at man kan få et helt A4-ark vist på én gang.

Start herefter højtlesningen som beskrevet på modstående side.